


Zweiter Morgenurin mit Stabilisator




Lieferumfang




1 Schraubröhrchen
mit Stabilisator

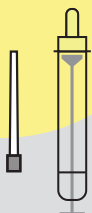

1 Urin-Monovette®
mit Plastikspitze

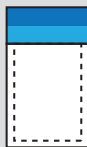


1 RigidSafetyBag®

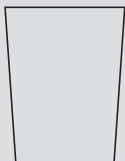

1 Urinbecher
(optional)



Etikett zum
Beschriften

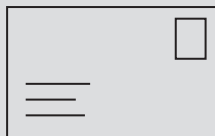

1 Rücksende-
couvert

Hinweise

Allgemeine Hinweise

- Bitte vor der Urinsammlung diese Testanleitung sorgfältig durchlesen.
- Testkit für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren.
- Achtung, nicht beschriftete Urinproben werden vernichtet.

Hinweise zur Testdurchführung

- Nicht unmittelbar nach grosser körperlicher Anstrengung.
- Nicht während oder kurz nach der Menstruation.
- Nicht bei Blasenentzündung.
- Urinproben nicht direktem Sonnenlicht oder Wärme aussetzen.

Hinweise zum Probenversand


- Nur zwischen Montag und Donnerstag und nicht vor Feiertagen.
- Urinprobe noch am selben Tag an SwissAnalysis zurückschicken.

Hinweise

Erklärungen

- Nach dem Aufstehen normal zur Toilette gehen.
Diesen ersten Morgenurin **nicht** sammeln.
Danach normal frühstücken.
Nicht mehr als 0,3 Liter trinken.
Kaffee ist vor der Urinprobe nicht erlaubt.
Den nächsten Urin, d.h. den **zweiten Morgenurin** sammeln. Dieser wird im Laufe des Vormittags nach dem ersten Morgenurin, meistens zwischen 10 und 12 Uhr, spontan ausgeschieden.
- Vom zweiten Morgenurin wird der **Mittelstrahlurin** gesammelt, d.h. die erste Portion Urin wird ausgeschieden und ohne Unterbrechung des Harnstrahls wird die zweite Portion Urin im Gefäß gesammelt.
Das Gefäß darf dabei den Körper nicht berühren.
Der restliche Urin wird wieder normal ausgeschieden.
- Bei Hitze oder Frost Urinprobe direkt am Postschalter abgeben.

Vorbereitung

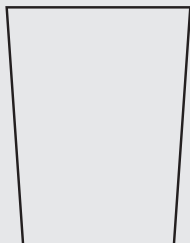

Urinbecher


Für die Urinprobe einen Urinbecher oder ein sauberes und trockenes Gefäß benutzen.



Hände waschen


Vor der Urinsammlung die Hände gut mit Wasser und Seife waschen.

Entnahme

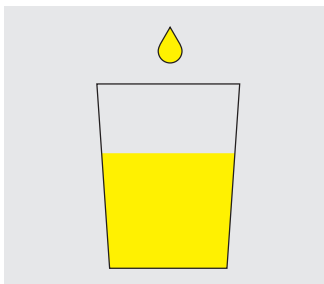


1. Urin auffangen

Den zweiten Morgenurin sammeln.

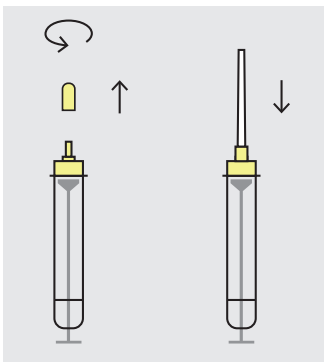

2. Spitze aufsetzen


Danach die Urin-Monovette® nehmen, den kleinen vorderen Verschluss entfernen und die gelbe Plastikspitze aufsetzen.

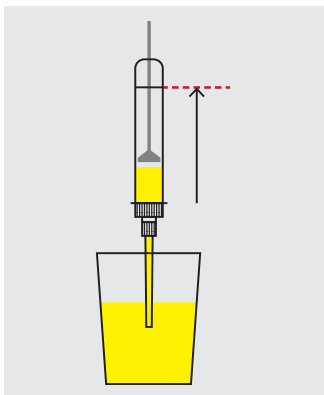

3. Urin-Monovette® befüllen

Die gelbe Plastikspitze ins Gefäß eintauchen und die Urin-Monovette® bis zum Anschlag aufziehen, so dass sie komplett gefüllt ist.


Entnahme

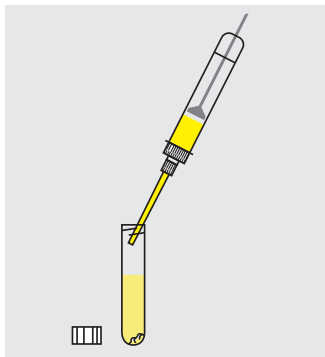

4. Urin umfüllen


Danach den Urin in das Schraubröhrchen spritzen.

Die Probe muss das vorgegebene Volumen enthalten.

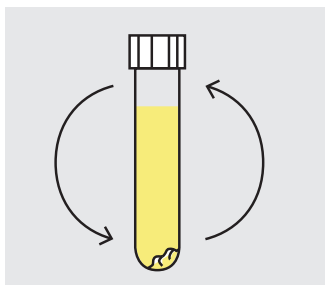

5. Verschliessen und Schwenken

Das Schraubröhrchen gut verschliessen und 4 - 5 mal über Kopf schwenken.

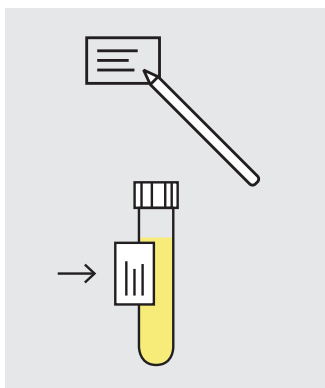


Etikett beschriften

Etikett in DRUCKBUCHSTABEN mit Namen, Datum und Entnahmezeit beschriften.


Beschriftetes Etikett erst nach der Urinprobe in Längsrichtung auf das Schraubröhrchen kleben.

Versand

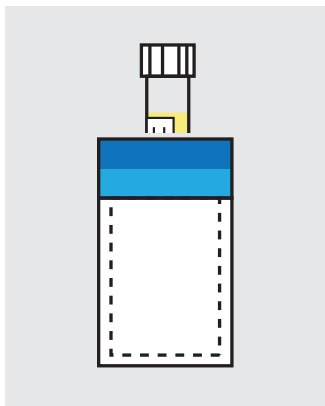

Probe in RigidSafetyBag®

Das Schraubröhrchen in das RigidSafetyBag® legen.

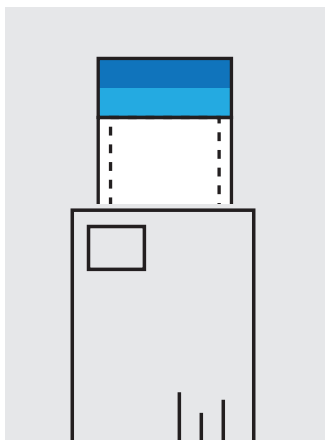

Einsenden

Den RigidSafetybag® in das Rücksendecouvert legen und noch am selben Tag an SwissAnalysis zurückschicken.

Bis zum Versand die Urinprobe im Kühlschrank (nicht im Gefrierfach) lagern.

SwissAnalysis AG
Hauptstrasse 137 D
CH-8274 Tägerwilen

swissanalysis.ch