


# Urinalysen



## Lieferumfang

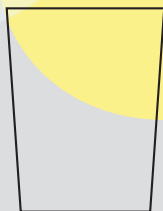

1 Urinbecher  
(optional)




1 Urin-Monovette<sup>®</sup>  
mit Plastikspitze



1 RigidSafety-  
Bag<sup>®</sup>



Etiketten zum  
Beschriften

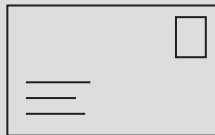

1 Rücksende-  
couvert

# Hinweise

## Allgemeine Hinweise

- Bitte vor der Urinsammlung diese Testanleitung sorgfältig durchlesen.
- Testkit für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren.
- Achtung, nicht beschriftete Urinproben werden vernichtet.

## Hinweise zur Testdurchführung

- Nicht unmittelbar nach grosser körperlicher Anstrengung.
- Nicht während oder kurz nach der Menstruation.
- Nicht bei Blasenentzündung.
- Urinproben nicht direktem Sonnenlicht oder Wärme aussetzen.

## Hinweise zum Probenversand

- Nur zwischen Montag und Donnerstag und nicht vor Feiertagen.
- Urinprobe noch am selben Tag an SwissAnalysis zurückschicken.
- Bei Hitze oder Frost die Urinprobe direkt am Postschalter abgeben.

# Hinweise

## Erster Morgenurin

Verwenden Sie für die Analyse bitte den 1. Morgenurin

## Zweiter Morgenurin

Nach dem Aufstehen normal zur Toilette gehen.

Diesen ersten Morgenurin **nicht** sammeln.

Danach normal frühstücken.

Nicht mehr als 0,3 Liter trinken.

Kaffee ist vor der Urinprobe nicht erlaubt.

Den nächsten Urin, d.h. den **zweiten Morgenurin** sammeln. Dieser wird im Laufe des Vormittags nach dem ersten Morgenurin, meistens zwischen 10 und 12 Uhr, spontan ausgeschieden.


## Spontanurin

Verwenden Sie für die Analyse bitte den Spontanurin  
(nicht nüchtern , Uhrzeit egal)

## Erster Morgenurin, Zweiter Morgenurin, Spontanurin

- Es wird immer der **Mittelstrahlurin** gesammelt, d.h. die erste Portion Urin wird ausgeschieden und ohne Unterbrechung des Harnstrahls wird die zweite Portion Urin im Gefäßsgesammelt.
- Das Gefäß darf dabei den Körper nicht berühren.
- Der restliche Urin wird wieder normal ausgeschieden.

# Vorbereitung

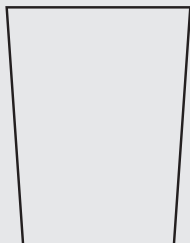

## Urinbecher


Für die Urinprobe einen Urinbecher oder ein sauberes und trockenes Gefäß benutzen.



## Hände waschen


Vor der Urinsammlung die Hände gut mit Wasser und Seife waschen.

# Entnahme

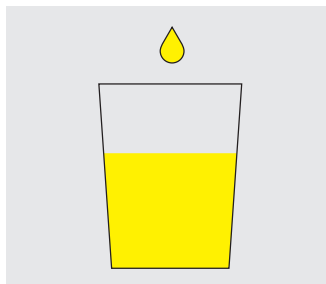


## 1. Urin auffangen

Den ersten, zweiten oder Spontanurin sammeln

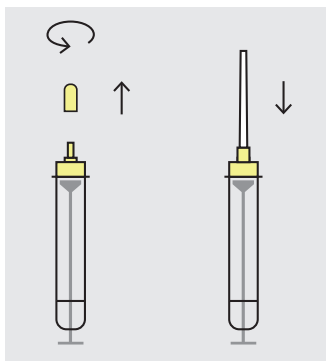

## 2. Spitze aufsetzen


Danach die Urin-Monovette<sup>®</sup> nehmen, den kleinen vorderen Verschluss entfernen und die gelbe Plastikspitze aufsetzen. Den Verschluss aufheben.

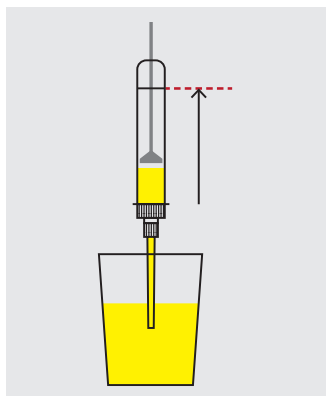

## 3. Urin-Monovette<sup>®</sup> befüllen


Die gelbe Plastikspitze ins Gefäß eintauchen und die Urin-Monovette<sup>®</sup> aufziehen, bis sie bis zur Basislinie gefüllt ist.

# Entnahme

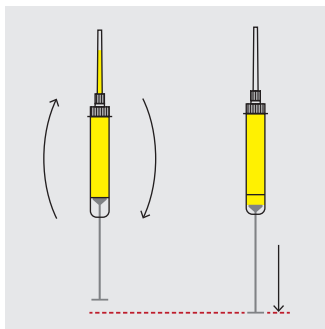


## 4. Spitze entleeren

Mit der Plastikspitze nach oben, die Urin-Monovette® senkrecht halten und den Kolben bis zum Anschlag nach unten ziehen, bis die Plastikspitze leer ist.

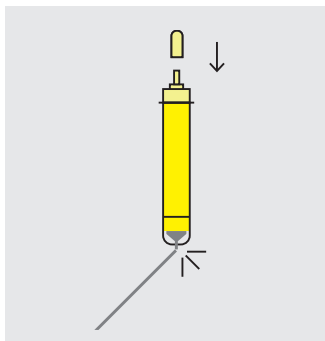

## 5. Stange abknicken


Die gelbe Plastikspitze abziehen und die Kolbenstange abknicken. Dann den Verschluss wieder gut aufsetzen.

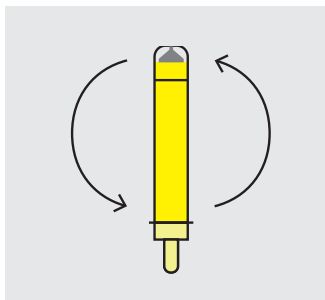

## 6. Schwenken


Die Urin-Monovette® 4 - 5 mal über Kopf schwenken.

# Versand

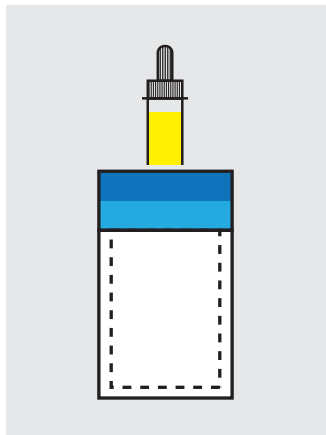

## Probe in RigidSafetyBag®

Die gut verschlossene Urin-Mo-novette® in das RigidSafetyBag® legen.

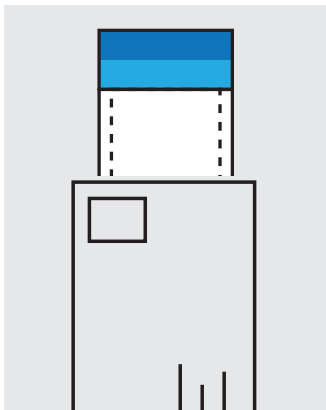

## Einsenden

Den RigidSafetyBag® in das Rücksendecouvert legen und noch am selben Tag an Swiss-Analysis zurückschicken.

Bis zum Versand die Urinprobe im Kühlschrank (nicht im Gefrierfach) lagern.

**SwissAnalysis AG**  
Hauptstrasse 137 D  
CH-8274 Tägerwilen

[swissanalysis.ch](http://swissanalysis.ch)