

Materialgewinnung

NaF – B L U T

NaF – P L A S M A

Graues Röhrchen – BD-Vacutainer System

NaF-Blut

- Bei unvollständiger Füllung keine Konsequenzen für die Messergebnisse
- Das Röhrchen sofort nach Abnahme durch langsames Kippen gut mischen. Mindestens 5x schwenken. Nicht schütteln!
Ansonsten evtl. geronnenes Röhrchen; Messwerte können verfälscht sein.
- Röhrchen beschriften und verschicken

NaF-Plasma

- Das Röhrchen sofort nach Abnahme durch langsames Kippen gut mischen. Mindestens 5x schwenken. Nicht schütteln!
Ansonsten evtl. geronnenes Röhrchen; Messwerte können verfälscht sein.
- Das Blut **sofort** nach Abnahme im Abnahmeröhrchen bei 1500g bzw. ca. 3000U/min für 10-15 Min. zentrifugieren
- Überstand (Plasma) vorsichtig in ein neutrales Versandröhrchen pipettieren
- Das Röhrchen mit **NaF Plasma** und Patientendaten beschriftet

Versand:

Material bis zum Versand im Kühlschrank aufbewahren. Nicht einfrieren.

Haben Sie noch Fragen? – Wir helfen Ihnen weiter

Tel. +41 71 666 77 22
info@swissanalysis.ch