

## Materialgewinnung

# SPURENELEMENTRÖHRCHEN

Dunkelblauens Röhrchen – BD-Vacutainer System

### SPE Serum

- Bei unvollständiger Füllung keine Konsequenzen für die Messergebnisse
- Das Röhrchen sofort nach Abnahme durch langsames Kippen gut mischen. Mindestens 5x schwenken. Nicht schütteln!  
Ansonsten evtl. geronnenes Röhrchen; Messwerte können verfälscht sein.
- Bitte innerhalb 30min das Röhrchen zentrifugieren, dann den Überstand sauber in das Serum-SPE-Versand-Röhrchen abpipettieren
- Röhrchen beschriften und verschicken

Versand:  
Nicht einfrieren.

Haben Sie noch Fragen? – Wir helfen Ihnen weiter

Tel. +41 71 666 77 22  
[info@swissanalysis.ch](mailto:info@swissanalysis.ch)