

Materialgewinnung

SPURENELEMENTRÖHRCHEN

Dunkelblauens Röhrchen – BD-Vacutainer System

SPE

- Bei unvollständiger Füllung keine Konsequenzen für die Messergebnisse
- Das Röhrchen sofort nach Abnahme durch langsames Kippen gut mischen. Mindestens 5x schwenken. Nicht schütteln!
Ansonsten evtl. geronnenes Röhrchen; Messwerte können verfälscht sein.
- Röhrchen beschriften und verschicken

Versand:

Material bis zum Versand im Kühlschrank aufbewahren. Nicht einfrieren.

Haben Sie noch Fragen? – Wir helfen Ihnen weiter

Tel. +41 71 666 77 22
info@swissanalysis.ch